



Retire a tampa da caneta.



Remova o selo protetor de uma agulha descartável nova e rosqueie no sistema de aplicação.



Atenção: Guarde a tampa externa para utilizar na remoção da agulha.



Atenção: Guarde a tampa externa para utilizar na remoção da agulha. Retire a tampa interna da agulha e descarte-a.



Atenção: Guarde a tampa externa para utilizar na remoção da agulha. Retire a tampa interna da agulha e descarte-a.



Faça o teste de fluxo, pois as vezes bolhas de ar podem aparecer no produto.

Gire e selecionar

*O teste de fluxo pode variar de acordo com o medicamento. Seguir o recomendado em bula.



Mantenha a agulha apontada para cima e bata levemente.




Com a caneta na vertical, aperte o botão de aplicação até alinhar o marcador com o zero.




Uma gota de medicamento deve aparecer na ponta da agulha.



Se não, troque a agulha e repita o procedimento não mais que 6 vezes.

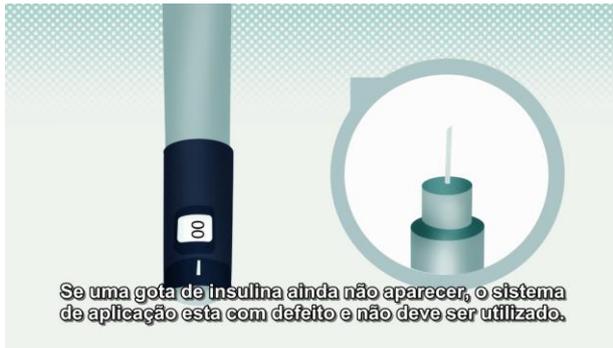

Se uma gota de insulina ainda não aparecer, o sistema de aplicação esta com defeito e não deve ser utilizado.

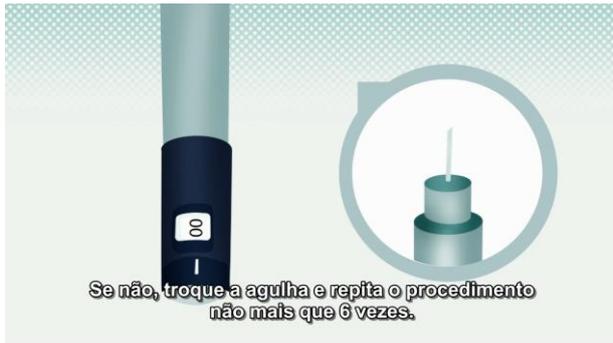


Se não, troque a agulha e repita o procedimento não mais que 6 vezes.



Agora vamos seguir com a aplicação.




Selecionar a dose

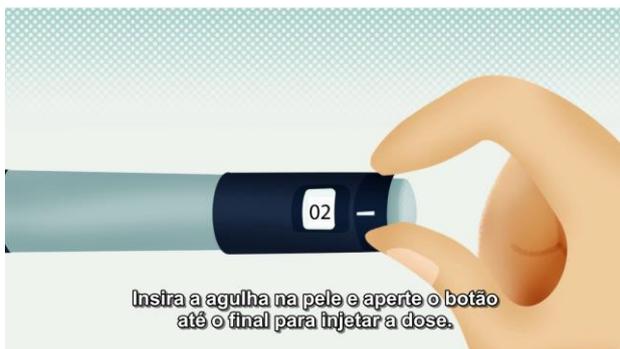

Insira a agulha na pele e aperte o botão até o final para injetar a dose.

00:06
PRONTO
Aguarde por pelo menos seis segundos mantendo o botão pressionado.

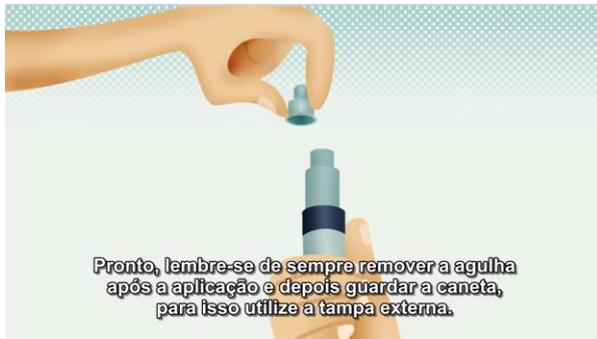

Pronto, lembre-se de sempre remover a agulha após a aplicação e depois guardar a caneta, para isso utilize a tampa externa.



Tampe a caneta para guardar.



Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
© Marca registrada Novo Nordisk A/S
© 2018 Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
Disk Novo Nordisk: 0800 14 44 88
www.novonordisk.com.br

MAIM-002-06/2018

*Material destinado ao público em geral.
Esse material é de inteira responsabilidade da Novo Nordisk, não havendo caráter de recomendação de compra ou uso pelo CONASEMS